

COMPAT® STAYPUT

9/18 FR 120/165 cm ENFit®


Compat® StayPut 9/18 FR er en nasojejunal sonde med dobbeltlumen i polyuretan. Den er produsert for alvorlig syke pasienter som trenger tidlig enteral administrering av ernæring, væsker eller legemiddel til tynntarmen og samtidig gastrisk drenering.


KORT OM FUNKSJONENE

Compat® StayPut 9/18 FR er utformet for plasseringsteknikker med direkte visualisering (f.eks. endoskopi, intervensjonsradiologi) og endoskopisk manipulasjon.

18 FR dreneringssonden har markeringer for plasseringsdybde ved hver 5. cm for å bedømme plasseringsdybden og kontroll av sonden. Sondene er røntgentette og har en tett røntgenspiss som gjør det lettere å bekrefte korrekt plassering av sonden. Det inngår en forhåndsmontert leder for å lette plasseringen av sonden. Lederen er smurt for å redusere risikoen for at sonden flyttes på når lederen fjernes.

Den jejunale ernæringssonden er kompatibel med alle administreringssett og sprøyter med ENFit®-koblinger. ENFit®-koblinger er utformet slik at den ikke kan brukes med intravenøse produkt for økt pasientsikkerhet. Dette for å unngå feilkoblinger. Den hvite koblingen på magesekksonden er kompatibel med de fleste dreneringssondene.

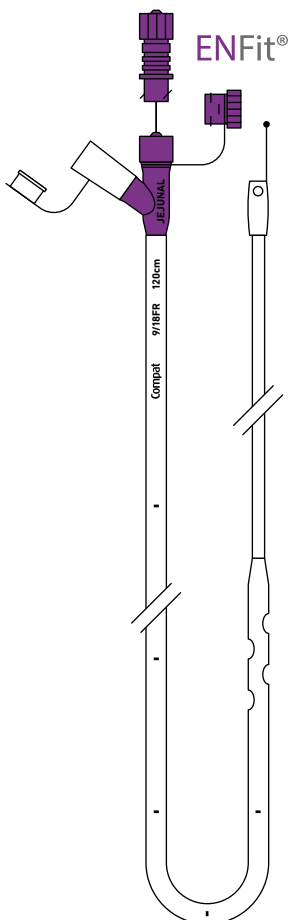

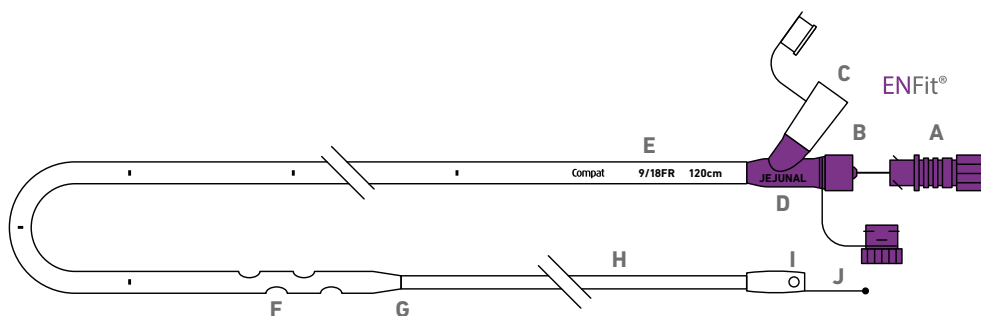

KOMPONENTER

- A** Forhåndssmurt og åpen gjennomstrømningsleder
- B** ENFit®-kobling med skrukork med lokk for næringssonde
- C** Kobling for magesekkdrenasje med lokk
- D** Sondeidentifisering på koblingen
- Gastrisk sonde**
- E** 18 FR/120 cm røntgentett magesekksonde med markering for plasseringsdybde på hver 5. cm
- F** Fire drenasjehull på sonden (to på hver side)
- G** Røntgentett ende
- Jejunal sonde**
- H** 9 FR/165 cm jejunal røntgentett næringssonde
- I** Røntgentett ende med to laterale utganger for næring og åpen distal ende for plassering med hjelp av en pre-plassert leder (denne leder inngår ikke).
- J** Antennespiss for å avhjelpe endoskopisk manipulasjon.

SPESIFIKASJONER

- Sondemål:** Gastrisk 18 FR/120 cm/47 tum Ø 6,0/4,8 mm.
Jejunal 9 FR/165 cm/65 tum Ø 3,0/2,2 mm.
- Siterilitet:** Sterilisert med etenoksid.
- Forpakning:** Individuelt pakket i esker med 1 enhet (220 x 25 x 235 mm).
- Oppbevaring:** Beskyttes mot direkte sollys og fukt.
- Holdbarhet:** Opptil 3 år fra produksjonsdato. Utløpsdato på forpakningen.
- Brukstid:** Opptil 29 dager. Til engangsbruk.
- ISO-standard:** Oppfyller ISO-standard 80369-1. Utviklet for å oppfylle kommende ISO-standard 80369-3.
- Miljøsymbol:** Grønt-punkt symbolet markerer at Nestlé Health Science kjenner sitt produsentansvar og bidrar til finansiering av gjenvinning.
- Materiale:** Slange: Polyuretan. Kobling: ABS. Produsert uten bruk av naturgummilatex, DEHP og BPA. Nærmere informasjon blir gitt på forespørsel.

BESTILLING

Produktet kan kjøpes via apotek, bandagist leverandør av medisinsk forbruksmateriell. Grossister bestiller hos: Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

Bestilling: orders@no.nestle.com

Spørsmål ang. bestilling:
kundeservice@no.nestle.com

Tlf. kundeservice: 67 81 73 99

PRODUKT	BEST.NR.	VAREN
Compat® StayPut 9/18 FR 120/165 cm ENFit®	90 06 11	97 31 34

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 stk

* Enkelte inkompatibiliteter kan forekomme.

For nærmere informasjon, kontakt din representant for Nestlé Health Science eller gå til www.compat.com

® Registrert varemerke som tilhører Société des Produits Nestlé S.A.

For ytterligere informasjon om ENFit® besøk www.stayconnected.org